

Instru Zym wipes

Produktinformation



Produktbeschreibung

Instru Zym wipes sind gebrauchsfertige Reinigungstücher auf Enzymbasis. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

Anwendungsgebiet

Instru Zym wipes werden zur Vorreinigung von Endoskopen und medizinischem Zubehör, sowie für chirurgische und orthopädische Instrumente eingesetzt. Dabei werden grobe, organische Verschmutzungen materialschonend entfernt.

Anwendungshinweise

Das zu reinigende Instrument nach dem Einsatz schnellstmöglich mit einem Instru Zym wipes sorgfältig abwischen. Bei Bedarf mit einem neuen Tuch solange wiederholen, bis die Oberfläche optisch sauber ist. Vorzugsweise sollte die Vorreinigung mit den Instru Zym wipes vom sauberen Ende des Instrumentes zum verschmutzten Ende hin durchgeführt werden. Nur für den professionellen Gebrauch.



Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Tuchgröße	Gebindeart	Verpackungseinheit	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Verpackungseinheit)
601795	80 Tücher	20 × 20 cm	Flowpack (mit LID)	6 × 80 Tücher	19691834	4260181257563	4260181257570

Instru Zym wipes

Produktinformation



Medizinproduktklasse

I

Zusammensetzung

Inhaltsstoffe

Protease, Amylase, Lipase, nichtionische Tenside, Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes Wasser

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

36 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wieder verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Informationen zu diesem Produkt



Weiterführende
Informationen finden Sie
auf unserer Homepage
www.drdeppe.de

Spezielle Anfragen
richten Sie bitte an
info@drdeppe.de