



Produktbeschreibung

Lotio 2in1 sind alkoholfreie, gebrauchsfertige und Aloe Vera-haltige Desinfektionstücher zur Hände- und Flächendesinfektion. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

Anwendungsgebiet

Ein Tuch für zwei Anwendungsbereiche: Lotio 2in1 ist sowohl zur Händedesinfektion, als auch zur Flächendesinfektion einsetzbar.

Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)


Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände wie auch Flächen reinigen. Zur Händedesinfektion die trockenen Hände mit dem feuchten Tuch benetzen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten, gegebenenfalls ein weiteres Tuch verwenden. Zur Flächendesinfektion die Fläche vollständig benetzen und gegebenenfalls mit einem zweiten Tuch nachwischen. Die Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Die Einwirkzeiten beachten.



Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnr.	Gebindegr.	Tuchgröße	Gebindeart	Verpackungseinh.	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Verpackungseinheit)
601643	60 Tücher	18 x 20 cm	Flowpack (mit LID)	20 x 60 Tücher	18849724	4260181254722	4260181254739
601911	60 Tücher	18 x 20 cm	Flowpack (mit Anfassflasche)	22 x 60 Tücher	19878828	4260181250021	4260181250014
601901	15 Tücher	15 x 20 cm	Mini-Flowpack (mit Anfassflasche)	50 x 15 Tücher	19881569	4260181259147	4260181259154

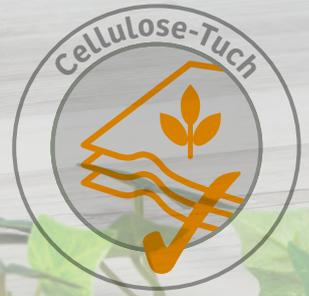

Biozidregistriernummer

N-86407
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:
0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid
0,5 g 2-Phenoxyethanol

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit
24 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde
28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Einwirkzeiten

Lotio 2in1 (Cellulose)	Belastung		Norm	Einwirkz.
	hoch	niedr.		
Bakterizid		x	EN 13727* EN 16615	1 Min.
Levurozid		x	EN 13624* EN 16615	
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)		x	EN 14476*	

*getestet an der Tränklösung

Informationen
zu diesem Produkt



Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.drdeppe.de
Spezielle Anfragen richten Sie bitte an info@drdeppe.de



Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen
T +49 (0) 2152 5565-0 W www.drdeppe.de