

Desinfektionsplan Physiotherapie



*** Hinweise zur Flächenreinigung und -desinfektion:**

Beim Ansetzen und Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionslösungen persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Auftreten von speziellen Erregern wie z.B. Noroviren, Clostridioides difficile, Hepatitis A und E müssen die eingesetzten Desinfektionsmittel potenziell getauscht oder in der Konzentration angepasst werden. Beim Auftreten dieser Erreger unbedingt die Herstellerinformationen im jeweiligen Produktdatenblatt in Bezug auf das Wirkungsspektrum überprüfen. Flächendesinfektionsmittel nicht mit anderen Substanzen mischen; max. Standzeit der abgedeckten, ungetrübten Lösung - 24 h / Tücher Systeme - siehe Anweisung. Bei Unterhalts-Wischdesinfektion kann die Fläche nach Abtrocknung wieder genutzt werden. Bei Schlussdesinfektion lt. VAH / Rki-Listen, Flächen erst nach Einhaltung der gesamten Einwirkzeit wieder nutzen.

Allgemeine Hinweise:

Es sind die produktspezifischen Anwendungs- und Sicherheitshinweise des entsprechenden Herstellers zu beachten. Dieses Dokument ergänzt Ihre einrichtungsspezifischen Arbeitsanweisungen und den Hygienerahmenplan. Der Desinfektionsplan ist regelmäßig vom Anwender zu kontrollieren bzw. zu aktualisieren. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

Reinigung				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händewaschung	<ul style="list-style-type: none"> - vor Arbeitsbeginn - bei sichtbarer Verschmutzung - nach WC- Benützung - vor Pausen und Dienstschluss 	Lotio Med Soft Professional & Care Lotio Med Sensitive Professional & Care	gebrauchsfertig gebrauchsfertig	<ul style="list-style-type: none"> - mit Waschlotion und Wasser die Hände waschen - gründlich mit Einmalpapier abtrocknen

Desinfektion Haut / Hände				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hygienische Händedesinfektion	vor: - Patientenkontakt - aseptischen Tätigkeiten nach: - Patientenkontakt - Kontakt mit kontaminiertem Material - Kontakt mit d. Patumgebung - bei Clostridioides difficile - Hepatitis A + E Viren	OpSept virugon®	gebrauchsfertig / 3 ml / 30 Sekunden	<ul style="list-style-type: none"> - ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel auf die trockenen Hände geben - gleichmäßig verreiben - auf Fingerkuppen und Nagelbett besonders achten - während Einwirkzeit mit Desinfektionsmittel feucht halten - Hygienische Händedesinfektion und anschließend Händewaschung vornehmen

Pflege				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händepflege / Hautschutz	- so oft wie möglich	Lotio Lind Professional & Care Lotio Protect Professional & Care	gebrauchsfertig gebrauchsfertig	<ul style="list-style-type: none"> - Hände sorgfältig eincremen - Produkte siehe „Hautschutzplan“

Desinfektion Fläche*				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Turngeräte: z.B. Barrenholme, Sprossenwand, Fitnessgeräte, Gymnastikbälle	<ul style="list-style-type: none"> - wöchentlich - nach Kontamination 	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- Patienten führen vor Benutzung der Geräte eine hygienische Händedesinfektion durch
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	<ul style="list-style-type: none"> - desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
Behandlungs- und Massageliegen	<ul style="list-style-type: none"> - arbeitstäglich - nach Kontamination - für jeden Patient wird eine frische Textilunterlage genutzt 	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	<ul style="list-style-type: none"> - desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Lagerungshilfsmittel: z.B. Nackenrolle, Kissen, Knierolle	<ul style="list-style-type: none"> - arbeitstäglich - nach Kontamination - für jeden Patient wird eine frische Textilunterlage genutzt 	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	<ul style="list-style-type: none"> - desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	

Datum Erstellung	Unterschrift	Datum Prüfung	Unterschrift
Datum Freigabe	Unterschrift		

Desinfektionsplan Physiotherapie



Desinfektion Fläche*		Konzentration / Einwirkzeit		WIE
WAS	WANN	WOMIT		
Sitzflächen: z.B. Hocker, Bänke, Stühle, Rollstühle	- arbeitstäglich - nach Kontamination	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Bewegungsschienen	- nach jedem Patientenkontakt	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
Zubehör des Schlingentisches	- nach Kontamination - bei optischer Verschmutzung	Waschmaschine		- chemothermische Aufbereitung
Handbad (Parafin)	- alle 3 Monate - bei optischer Verschmutzung	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- Patienten führen vor der Benutzung eine hygienische Händedesinfektion durch - Inhalt entfernen/ desinfizierend auswischen, Einwirkzeit beachten / vor dem Befüllen mit Wasser nachspülen - Herstellerinformationen zur Reinigung, Desinfektion und Wartung sind zu beachten
Elektrodenschwämmchen	- patientenbezogene Nutzung	Einwegartikel		- nach Beendigung der Behandlung werfen
		Mehrwegartikel		- Herstellerinformation zur Aufbereitung beachten
Saugelektroden	- nach jedem Patientenkontakt	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
Fangopacks, Kühlpacks	- nach jedem Patientenkontakt - für jeden Patient wird eine frische Textilhülle genutzt	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
Flüssiger Fango	- für jeden Patient wird eine neue Folie und Textilhülle genutzt	Fango-Rührwerk		- die benutzte Fango-Masse wird einmal täglich für ca. 40 Minuten auf 130°C erhitzt (Sterilisationsphase)
		Individuelle Aufbereitung		- Die Aufbereitung ist abhängig vom eingesetzten System. Die Herstellerinformationen sind zu beachten.
Arbeitsflächen, Schränke, offene Regale	- Arbeitsflächen: vor und nach Benutzung - Schränke: innen: monatlich außen: wöchentlich - offene Regale: wöchentlich	Spray In QF Bio-wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- desinfizierend abwischen - nicht nachtrocknen - Einwirkzeit beachten
		Spray In QF	gebrauchsfertig / 1 Minute	
Schluss- / Wisch-Desinfektion lt. VAH/RKI *	- nach speziellen Erregern	ausgewiesene Mittel lt. Listen		- siehe Liste Schluss- / Wischdesinfektion lt. VAH/RKI

Datum Erstellung Unterschrift Datum Prüfung Unterschrift Datum Freigabe Unterschrift