



Produktbeschreibung

Lotio 2in1 sind gebrauchsfertige Aloe Vera-haltige Desinfektionstücher zur Hände- und Flächendesinfektion. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

Anwendungsgebiet

Ein Tuch für zwei Anwendungsbereiche: Lotio 2in1 Tücher sind für die Desinfektion von Händen und Oberflächen geeignet, was sie zu einem multifunktionalen Produkt macht und Platz in der Pflegebox spart. Das Produkt ist in Pflegebereichen und der häuslichen Pflege einsetzbar.

Wirkspektrum

bakterizid (inkl. MRSA), levurozid

begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)


Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände wie auch Flächen reinigen. Zur Händedesinfektion die trockenen Hände mit dem feuchten Tuch benetzen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten, gegebenenfalls ein weiteres Tuch verwenden. Zur Flächendesinfektion die Fläche vollständig benetzen und gegebenenfalls mit einem zweiten Tuch nachwischen. Die Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Die Einwirkzeiten beachten.



Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnr.	Gebindegr.	Tuchgröße	Gebindeart	Verpackungseinh.	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Verpackungseinheit)
601643	60 Tücher	18 x 20 cm	Flowpack (mit LID)	20 x 60 Tücher	18849724	4260181254722	4260181254739
601911	60 Tücher	18 x 20 cm	Flowpack (mit Anfassflasche)	22 x 60 Tücher	19878828	4260181250021	4260181250014

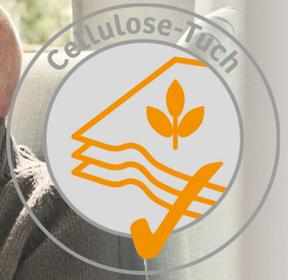

Biozidregistriernummer

N-86407
 Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und
 Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

**In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff
 enthalten:**

- 0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid
- 0,5 g 2-Phenoxyethanol

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

24 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig
 wiederverschließen. Nur feuchte Tücher
 verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in
 verschlossenem Zustand an einem gut
 belüfteten Ort auf und schützen Sie es
 gegen unbefugten Zugriff.

Einwirkzeiten

Lotio 2in1	Belastung		Norm	Ein- wirkz.
	hoch	niedr.		
Bakterizid		x	EN 13727* EN 16615	1 Min.
Levurozid		x	EN 13624* EN 16615	
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)		x	EN 14476*	

*getestet an der Tränklösung

Informationen

zu diesem Produkt



Weiterführende Infor-
 mationen finden Sie auf
 unserer Homepage
www.drdeppe.de

Spezielle Anfragen
 richten Sie bitte an
info@drdeppe.de



Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35 • 47906 Kempen
 T +49 (0) 2152 5565-0 W www.drdeppe.de