

Spray Off wipes

Produktinformation



Produktbeschreibung

Spray Off wipes sind alkoholische, aldehydfreie Flächen-desinfektionstücher in gebrauchsfertiger Form. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt werden.

Anwendungsgebiet

Zur Schnell-desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.

Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40 Viren
- viruzid

Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.



Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Tuchgröße	Gebindeart	Verpackungseinheit	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Verpackungseinheit)
601798	80 Tücher	20 × 20 cm	Flowpack (mit LID)	12 × 80 Tücher	19691751	4260181257464	4260181257471
601805	70 Tücher	29 × 30 cm	Eimer	1 × 70 Tücher	19691745	4260181257488	4260181257495
601806	70 Tücher	29 × 30 cm	Eimer-Nachfüllpack	6 × 70 Tücher	19692561	4260181257440	4260181257457

Spray Off wipes

Produktinformation



Medizinproduktklasse

IIa

Biozidregistriernummer

N-91346

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:

63,50 g Ethanol

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

36 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde

28 Tage

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen. Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Einwirkzeiten

Spray Off wipes (Cellulose) Wirkspektrum	Belastung (hoch/niedrig)	Einwirkzeit	Norm
Bakterizid	mit Mechanik hoch	1 Minute	EN 13727* EN 16615
Levurozid	mit Mechanik hoch	1 Minute	EN 13624* EN 16615
Tuberkulozid (M. terrae), Mykobakterizid (M. terrae, M. avium)	hoch	1 Minute	EN 14348*
Fungizid (C. albicans, A. brasiliensis)	hoch	5 Minuten	EN 13624*
Begrenzt viruzid nach DVV/RKI (Vaccinia Stamm Elstree, BVDV Stamm NADL)	10% FKS	1 Minute	DVV/RKI*
Begrenzt viruzid nach EN 14476 (Modified Vaccinia Ankara)	niedrig	1 Minute	EN 14476*
Begrenzt viruzid PLUS nach DVV/RKI (Murines Norovirus, Adenovirus Typ 5)	10% FKS	1 Minute	DVV/RKI*
Viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40 nach DVV/RKI	10% FKS	5 Minuten	DVV/RKI*
Viruzid (Murines Norovirus, Adenovirus Typ 5, Poliovirus Typ 1)	niedrig	5 Minuten	EN 14476*

* an der Tränklösung getestet

Informationen zu diesem Produkt



Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.drdeppe.de

Spezielle Anfragen richten Sie bitte an info@drdeppe.de

CE 0044




Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen
T +49 (0) 2152 5565-0 W www.drdeppe.de