

Desinfektionsplan Arztpraxis



*** Hinweise zur Flächenreinigung und -desinfektion:**

Beim Ansetzen und Gebrauch von Reinigungs- und Desinfektionslösungen persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Auftreten von speziellen Erregern wie z.B. Noroviren, Clostridioides difficile, Hepatitis A und E müssen die eingesetzten Desinfektionsmittel potenziell getauscht oder in der Konzentration angepasst werden. Beim Auftreten dieser Erreger unbedingt die Herstellerinformationen im jeweiligen Produktdatenblatt in Bezug auf das Wirkungsspektrum überprüfen.

**** Hinweise zur Instrumentenreinigung und -desinfektion:**

Es sind die Herstellerangaben in Bezug auf die Aufbereitung zu beachten.

Allgemeine Hinweise:

Es sind die produktspezifischen Anwendungs- und Sicherheitshinweise des entsprechenden Herstellers zu beachten. Dieses Dokument ergänzt Ihre einrichtungsspezifischen Arbeitsanweisungen und den Hygienerahmenplan. Der Desinfektionsplan ist regelmäßig vom Anwender zu kontrollieren bzw. zu aktualisieren. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

Reinigung				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Händewaschung	<ul style="list-style-type: none"> - vor Arbeitsbeginn / nach Pausen - zum Arbeitende - bei sichtbarer Verschmutzung - nach Toilettenbenutzung 	<ul style="list-style-type: none"> Lotio Med Soft Professional & Care Lotio Med Sensitive Professional & Care 	<ul style="list-style-type: none"> gebrauchsfertig gebrauchsfertig 	siehe Hygieneplan Händehygiene

Desinfektion Haut / Hände				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hygienische Händedesinfektion auch bei Adenoviren (-Verdacht)	<ul style="list-style-type: none"> - vor Patientenkontakt - vor aseptischen Tätigkeiten - nach Patientenkontakt - nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material (z.B. Blut); auch nach Ablegen von Handschuhen - nach Kontakt mit der Patientenumgebung 	OpSept virugon*	gebrauchsfertig / 3 ml / 30 Sekunden	Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Weitere Informationen siehe Hygieneplan Händehygiene.
Chirurgische Händedesinfektion	- vor allen chirurgischen Eingriffen	OpSept virugon*	gebrauchsfertig / ausreichende Menge / 2 Minuten	Während der gesamten Einwirkzeit von 2 Minuten die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Weitere Informationen siehe Hygieneplan Händehygiene.
Hautdesinfektion	- talgdrüsenarme und talgdrüsenreiche Haut			Einwirkzeiten nach Herstellerangaben
Wund und Schleimhautdesinfektion	- zum Desinfizieren von Wunden			Einwirkzeiten nach Herstellerangaben
	- vor Katheterisierung der Harnblase			Einwirkzeiten nach Herstellerangaben

Pflege				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Hautpflege	<ul style="list-style-type: none"> - bei Bedarf mehrmals täglich - am Arbeitende 	<ul style="list-style-type: none"> Lotio Lind Professional & Care Lotio Protect Professional & Care 	<ul style="list-style-type: none"> gebrauchsfertig gebrauchsfertig 	siehe Hygieneplan Händehygiene

Datum Erstellung	Unterschrift	Datum Prüfung	Unterschrift
Datum Freigabe	Unterschrift		

Desinfektionsplan Arztpraxis



Desinfektion Fläche*		Konzentration / Einwirkzeit		
WAS	WANN	WOMIT		WIE
Medizinische Geräte (Monitor, Tastaturen), Flächen	- nach jedem Patientenkontakt - Arbeitsflächen für aseptische Tätigkeiten (z.B. durch die Anästhesie) - bei sichtbaren Verschmutzungen - am Ende der Sprechstunde - nach infektiösen Patienten	Spray In QF wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten.
Arbeitsflächen, Patientenliege etc.	- nach Benutzung / Patientenwechsel - mind. einmal täglich - bei sichtbarer Verschmutzung sofort	Spray In QF wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	- Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nicht nachtrocknen.
		Beta Guard Neu	3% / 5 Minuten	- Bei der Verwendung Handschuhe tragen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nicht nachtrocknen.
Fußböden (sofern Desinfektion erforderlich)	- mindestens einmal täglich - bei sichtbarer Verschmutzung sofort	Beta Guard Neu	3% / 5 Minuten	Desinfizierend wischen. Fläche kann nach dem Antrocknen wieder betreten werden. Einwirkzeit bei bekannten Erregern beachten.
Medizinprodukte (z.B. Schere, Pinzette, Klemmen)	Verwendung von Einmalprodukten: direkte Entsorgung in durchstichsicheren Abwurfbehälter			siehe Hygieneplan
	- Verwendung von wiederaufbereitbaren Medizinprodukten			siehe Hygieneplan
Spender für Desinfektionsmittel und Flüssigseife (Waschlotion)	- 1x pro Quartal - beim Wechsel der Flaschen (Außengehäuse) - vollständige Aufbereitung siehe Hygieneplan	Spray In QF wipes	gebrauchsfertig / 1 Minute	Beim Wechsel der Flaschen (Außengehäuse): Tuch mit Handschuhen entnehmen, Fläche vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nicht nachtrocknen. Herstellerangaben beachten. Weitere Informationen siehe Hygieneplan Aufbereitung Spender für Händedesinfektionsmittel und Flüssigseife (Waschlotion).



Desinfektion Instrumente**				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Wiederaufbereitbare Medizinprodukte (z.B. Mehrweginstrumente)	Vorreinigung (unmittelbar nach Gebrauch)	Instru Zym wipes	gebrauchsfertig	Unmittelbar nach Gebrauch grobe Verschmutzungen durch z.B. wischen, ab- oder durchspülen entfernen.
	Reinigung	Instru Zym	0,5-5%	Einlegen in die Reinigungslösung, ggf. zusätzliche manuelle Reinigung oder Ultraschallbad.
	Desinfektion (sofern erforderlich, im Anschluss Sterilisation)	Instru Plus	abhängig von den Anforderungen	Einlegen in die Desinfektionslösung, Einwirkzeit beachten, Schlusspülung durchführen.

Sonstiges				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Medizinische Einmalhandschuhe (geprüft nach DIN EN 455 und DIN EN 374)	Gezieltes Tragen, wenn Kontamination erwartet wird.			Schutz vor sichtbarer Verschmutzung, verhindert nicht den Keimdurchtritt. Nach dem Ablegen hygienische Händedesinfektion erforderlich.
PE-Schürze	Wenn die Arbeitskleidung (Front) kontaminiert oder durchnässt werden kann.			Über der Dienstkleidung tragen, nach Gebrauch entsorgen.
Schutzkittel (nach DIN EN 14126 geprüft)	Wenn die Arbeitskleidung kontaminiert oder durchnässt werden kann.			Über der Dienstkleidung tragen, nach Gebrauch entsorgen.
FFP2 Maske	Bei Verdacht oder Vorliegen von aerogen übertragbaren Infektionskrankheiten.			Auf korrekten Sitz der Maske achten, ggf. testen. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
Mund-Nasen-Schutz	Bei Verdacht oder Vorliegen von Tröpfchen übertragbaren Infektionskrankheiten.			Auf korrekten Sitz der Maske achten. Wechsel bei Durchfeuchtung oder sichtbarer Verschmutzung. Nach Gebrauch entsorgen. Abnehmen der Maske nach erfolgter hygienischer Händedesinfektion.
Augenschutz (dicht schließende Schutzbrille nach DIN EN 166 geprüft)	Zum Schutz der Augen und Schleimhäute vor Tröpfchen, Sekreten oder Chemikalien.			Entsorgen: - sofort nach Entstehung - entsprechend den kommunalen oder anderen Bestimmungen, getrennt nach Abfallarten - in durchstich- und bruchsicheren, sowie feuchtigkeitsbeständigen Behältnissen - in feuchtigkeitsbeständigen Abfallsäcken im Abfalleimer

Datum Erstellung Unterschrift Datum Prüfung Unterschrift Datum Freigabe Unterschrift

Desinfektionsplan Arztpraxis



Sonstiges				
WAS	WANN	WOMIT	Konzentration / Einwirkzeit	WIE
Abfälle	<ul style="list-style-type: none"> - Hausmüllähnliche Abfälle - spitze, scharfe oder zerbrechliche Gegenstände - mit Blut oder Sekreten behaftete Abfälle 			Entsorgen: - sofort nach Entstehung - entsprechend den kommunalen oder anderen Bestimmungen, getrennt nach Abfallarten - in durchstich- und bruchsicheren, sowie feuchtigkeitsbeständigen Behältnissen - in feuchtigkeitsbeständigen Abfallsäcken im Abfalleimer

Datum Erstellung Unterschrift

Datum Prüfung Unterschrift

Datum Freigabe Unterschrift